

Fiche technique



Informations


| | |
|-------------|--|
| Désignation | Barre droite 400 mm Design15, tube elliptique aluminium anodisé brillant |
| Référence | 144041 |



Les + produit

- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Esthétique et design.
- + Garantie totale anticorrosion.

Description

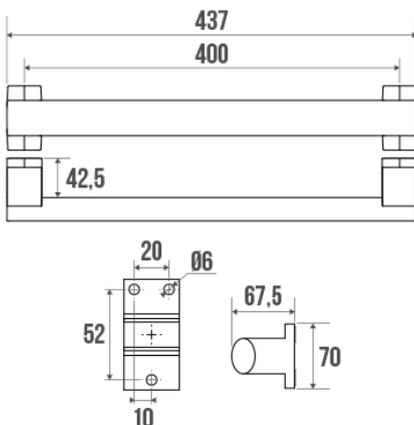

Tube elliptique en aluminium anodisé brillant 38 x 25 mm. Cache-fixations en résine de synthèse chromés.

Visserie fournie.
Design coordonné au siège de douche Design15.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|------------------|
| Matière | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Dimensions | 400 mm |
| Diamètre Ø | 38 x 25 mm |
| Poids brut | 0.500 kg |
| Poids Net | 0.445 kg |
| Conditionnement | Sachet plastique |
| CE : charge admissible | 150 kg |
| Tests laboratoire à | 225 kg |
| Garantie | 10 ans |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Gencod | 3111561440413 |
| Code douanier | 7615200000 |
| Notice | A49800030_IND_04 |

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

| | |
|-----------|------|
| Maintien | ★★★★ |
| Relevage | ★★★☆ |
| Transfert | ★★★★ |

Caractéristiques

| | |
|---------------|------|
| Horizontal | ★★★★ |
| Vertical | ★★★★ |
| Oblique | ★★★★ |
| Anticorrosion | ★★★★ |

Type d'utilisation

| | |
|------------------|------|
| Bain | ★★★★ |
| Douche | ★★★★ |
| WC | ★★★★ |
| Lavabo | ★★★★ |
| Vestiaire/Cabine | ★★★★ |

Lieux d'utilisation

| | |
|------------------|------|
| Ets médicaux | ★★★★ |
| ERP/IOP | ★★★★ |
| Hôtels | ★★★★ |
| Habitats privés | ★★★★ |
| Lieux de travail | ★★★★ |

Fiche produit mise à jour le : 19/02/2019